

Relief Insert® 2.0

Relief Insert® Walker 2.0

Relief Insert® Walker 2.0 Achill

Un dispositif - de nombreuses possibilités d'utilisation : attelle de positionnement, Walker et botte de marche pour lésions du tendon d'Achille dans un seul et même dispositif



DARCO



Avantages et caractéristiques

Avantages

- > 3 en 1 : grâce à des éléments individuels amovibles, le dispositif peut être utilisé dans de nombreux domaines :
 1. Comme attelle de positionnement
 2. Avec la chaussure de décharge partielle du pied Relief Dual® Plus comme orthèse de jambe-pied.
 3. Avec les cales de talon DAW (kit en 3 parties) comme botte de marche pour lésions du tendon d'Achille pour la prévention individuelle du pied équin
- > Se met et se retire en toute simplicité pour un contrôle facile des pansements
- > Maintien supplémentaire grâce à la sangle d'avant-pied en option (incluse)
- > Acceptation élevée des patients
 - Zone du talon souple grâce à la découpe de l'attelle
 - Design épuré
 - Poids plume
 - Hygiénique grâce au retrait de la chaussure et à la doublure remplaçable et lavable en machine à 60° C
 - Faible développement de chaleur

Caractéristiques

- > Pour la mobilisation et le positionnement post-opératoires
- > Démarche physiologique sûre
- > Concept thérapeutique durable en association avec la chaussure de décharge partielle du pied Relief Dual® Plus
- > Peut se porter de façon universelle à droite et à gauche
- > Semelle intérieure amovible

 Droite = Gauche

 Poids plume

 Semelle intérieure amovible


Stabilité maximale grâce à une adaptation individuelle

Pompe intégrée

Pour une stabilisation au niveau de la cheville, le volume des chambres à air peut être augmenté et donc adapté individuellement. Une réduction de l'air est possible en actionnant la valve.

Réglage automatique de la largeur

Grâce à la technique de coque innovante, l'orthèse se règle automatiquement sur le tour de mollet du patient. La compression des tissus mous qui en résulte génère une stabilité supplémentaire au niveau de la jambe inférieure et du pied. Lorsque les mollets sont particulièrement forts, le régulateur peut en outre être décroché.

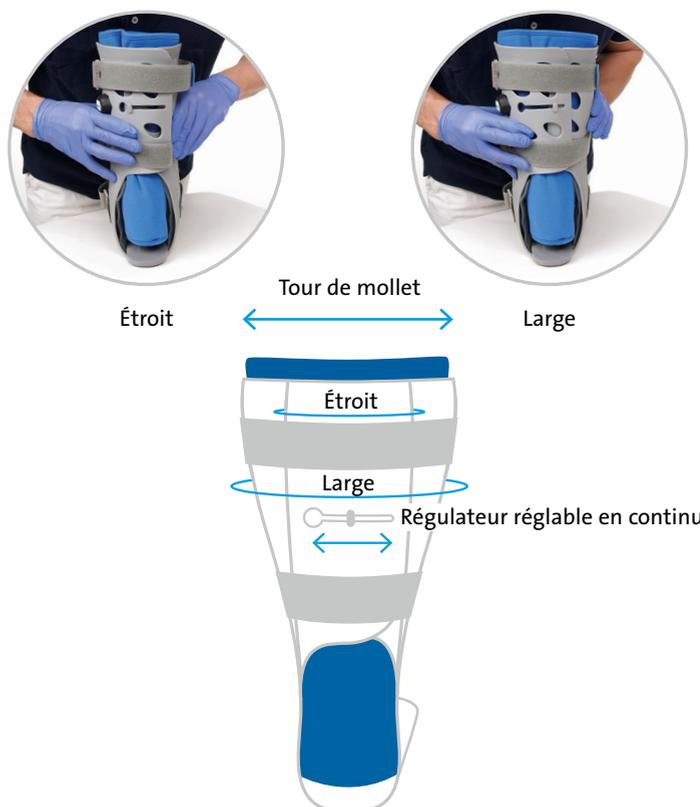

Utilisation 1

Attelle de positionnement | Relief Insert® 2.0

L'attelle de positionnement sert à maintenir le pied à un angle de 90° par rapport à la jambe inférieure. Pour soulager le tendon d'Achille, les cales de talon DAW peuvent être utilisées pour maintenir un contact intégral avec le pied.

Indications

Généralement utilisable lors de la thérapie conservatrice et postopératoire de blessures de la jambe inférieure, de la cheville et du pied :

- > Positionnement préopératoire et postopératoire
- > Prévention du pied d'équin
- > Stabilisation / Immobilisation posttraumatique
- > Immobilisation après accident
- > Stabilisation de courte durée (ruptures des ligaments, luxations, fractures, blessures, élongations, entorses, etc.)

Pour utilisation avec cales de talon en vue du positionnement en cas de :

- > Tendinite au niveau du talon d'Achille
- > Déchirure du tendon d'Achille
- > Contracture de la flexion plantaire dépassant 10°
- > Raccourcissement des muscles du mollet



Attelle de mollet avec doublure de mollet



Attelle avant avec doublure avant

Reglage automatique de la largeur :
Si nécessaire pour décrocher

Boucles de sangles

Pompe

Valve

Sangle d'avant-pied
optionnelle (lavable)

Semelle intérieure amovible

Air-Liner avec alvéoles

Utilisation 2

Orthèse de jambe-pied | Relief Insert® Walker 2.0

En plaçant la chaussure de décharge partielle du pied Relief Dual® Plus, l'attelle de positionnement se transforme en orthèse de jambe-pied mobilisatrice. Le Relief Insert® Walker 2.0. peut être adapté avec différentes semelles voûte plantaire coussinée DARCO pour une décharge supplémentaire de la pression plantaire. La PegContour® Insole Uni déjà intégrée au Walker – une semelle alvéolée de garniture souple avec contours de talon et effet de mémoire – garantit une répartition optimale de la pression. Les différentes alvéoles amovibles (pegs) permettent une adaptation individualisée et une décharge ponctuelle.

Indications

- > Immobilisation préopératoire et postopératoire / post-traumatique de la région pied-jambe, fractures stables du pied et de la cheville, distorsions sévères de la cheville
- > En phase postopératoire après des fractures de Weber
- > En cas de ruptures des ligaments au niveau de la cheville
- > Arthrodèses de la cheville supérieure
- > En postopératoire, après ablation d'une exostose de Haglund (avec tendon d'Achille intact)
- > Arthrodèse de la 1ère articulation TMT (intervention de Lapidus)
- > Après des opérations de fracture métatarsienne
- > Après des opérations de l'hallux valgus
- > Après des opérations de l'hallux rigidus
- > Après des opérations d'orteils en marteau et en griffe
- > Fractures des phalanges
- > Après opérations de l'arrière-pied

Compris dans la livraison

- > Relief Insert® 2.0 Attelle de positionnement
- > Relief Dual® Plus Chaussure de décharge partielle du pied
- > Sangle d'avant-pied optionnelle
- > PegContour® Insole Uni (déjà insérée dans le Walker)
- > Semelle intérieure grise en EVA (fournie en plus)



Relief Insert® 2.0
Attelle de positionnement

PegContour® Insole Uni
Semelle universelle alvéolée à
rembourrage souple

Relief Dual® Plus
Chaussure de décharge
partielle du pied

Utilisation 3

Achilles-Walker | Relief Insert® Walker 2.0 Achill

Le Relief Insert® Walker 2.0 Achill est une orthèse de jambe-pied associée à un kit de cales en 3 parties pour la décharge du tendon d'Achille. L'élévation et l'angle du pied équin peuvent être adaptés au patient en variant les cales appliquées. 3 cales correspondent à 120°. Un retrait progressif des cales permet d'adapter l'angle du pied équin à l'évolution de la thérapie. La zone ouverte et souple du talon garantit une bonne circulation de l'air et a un effet positif sur la cicatrisation.

Indications

- > Ruptures du tendon d'Achille
- > En postopératoire, après:
 - Suture du tendon d'Achille
 - Ablation d'une exostose (Haglund)

Compris dans la livraison

- > Relief Insert® 2.0 Attelle de positionnement
- > Relief Dual® Plus Chaussure de décharge partielle du pied
- > Sangle d'avant-pied optionnelle
- > DAW (DARCO Achilles Wedges) Cales de talon



Relief Insert® 2.0
Attelle de positionnement

Relief Dual® Plus
Chaussure de décharge partielle du pied

DAW (DARCO Achilles Wedges)
Cales de talon

Liste d'articles



Relief Insert® 2.0
Attelle de positionnement

Taille	Réf.
Couleur : Gris-Bleu	
S 37,0 – 40,5	RIX2-1
M 41,0 – 43,0	RIX2-2
L 43,5 – 47,0	RIX2-3



Relief Insert® Walker 2.0
Orthèse de jambe-pied

Taille	Réf.
Couleur : Gris-Bleu	
XS 37,0 – 38,5	RIW2-0
S 39,0 – 41,0	RIW2-1
M 41,5 – 43,0	RIW2-2
L 43,5 – 45,0	RIW2-3
XL 45,5 – 47,0	RIW2-4



Relief Insert® Walker 2.0 Achill
Achilles-Walker

Taille	Réf.
Couleur : Gris-Bleu	
XS 37,0 – 38,5	RIW2W-0
S 39,0 – 41,0	RIW2W-1
M 41,5 – 43,0	RIW2W-2
L 43,5 – 45,0	RIW2W-3
XL 45,5 – 47,0	RIW2W-4

Tailles et dimensions



Taille	Pointure	Semelle intérieure en cm			Hauteur de tige D	Taille Toe Cap, Semelle intérieure
		A	B	C		
XS	37,0 – 38,5	24,6	9,5	6,0	38,3 cm	WM
S	39,0 – 41,0	26,0	10,5	6,5	38,3 cm	MS
M	41,5 – 43,0	27,5	11,0	6,5	40,3 cm	MM
L	43,5 – 45,0	29,0	11,5	7,0	44,7 cm	ML
XL	45,5 – 47,0	31,0	12,5	7,5	44,7 cm	MXL

Compatible



Toutes les mesures sont définies en cm et correspondent à la semelle intérieure. Les tailles de chaussures DARCO ne représentent qu'une référence générale. Le choix de la pointure est fortement influencé par le volume des bandages et la taille du plâtre.



Plus d'informations